



STEP 1

주요 구성품 선택

주사기 본체는 발사 압력에 따라 3종류입니다. 사용목적에 따라 선택하세요.

주사기세트의 종류는 구성품에 따라 총 2종입니다. 구입을 희망하는 구성품에 따라 선택하세요.

세트 안의 '주사기 압력 종류' 선택



Soft Medium Normal

약물침투 깊이 및 주 사용분야 예시
*약물 침투 깊이는 인젝 부위의 피부 장력에 따라 차이가 있습니다.

본체종류	침투깊이	주요 사용분야 예시
Soft	약 1 cm	치과 잇몸 마취, Face 시술
Medium	2~2.5 cm	all skin 진피, 피하주사
Normal	2.5~3cm 이상	예방접종, 호르몬, 인슐린, 비디마취제 사용 시

*'주사기 본체'의 외관은 동일 합니다. 본체 내부에 내장된 특수 스프링의 강도가 다르며, 주사기 종류에 따라 약물의 침투 깊이가 다릅니다.

'세트 구성 종류' 선택



파우치세트

구성: 주사기 본체 1대 + 휴대용 가압 레버 1개 (노즐 10개 + 어댑터 1개 서비스 포함)

or



2 in 1 가압상자세트

구성: 주사기 본체 2대 + 가압상자 1개

STEP 2

어댑터 선택

저희 제품은 바늘이 없기 때문에 "노즐"에 약물을 담기 위해서는 약병 종류에 맞는 어댑터를 선택하여 약병과 연결 후 반대편에 노즐을 걸착하여 사용해야 합니다. 약병의 주둥이 모양을 고려하여 어댑터의 종류를 선택하세요.



댄탈용 어댑터
리모카인 주사기와 연동



인슐린 어댑터
핀타입 인슐린 주사기와 연동



베이알 어댑터
일부 베이알 약병과 일반 주사기와 연동



T 어댑터
대부분의 바이알 약병에 연동




루어 어댑터
18개지니들을 연결하여 사용
노즐과 연동시 일반 주사기와 유사 함

STEP 3

노즐 구성 선택

"노즐 1상자" 구매 또는 "노즐 + 생플어댑터 set" 중 선택하여 구매 하세요.

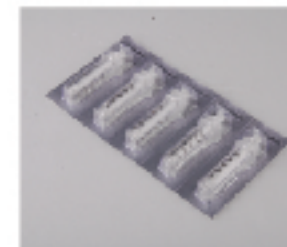

노즐 1상자(1상자=50개 구성)

or




노즐 1상자(1상자=50개 구성) + 어댑터 1종씩 총 5개로 구성

STEP 4


액세서리 선택

약물을 주입하고자 하는 부위가 얼굴이나 잇몸처럼 미끄럽거나 부드러운 경우 Skin을 보호하기 위하여 노즐끝에 장착하여 사용합니다. 필요에 따라 선택적 구매를 하세요.

*실리콘 재질로 소독하여 다회용으로 사용 가능

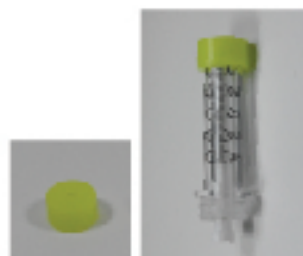

실리콘 캡 일자형
평평한 부위에 사용 시 선택

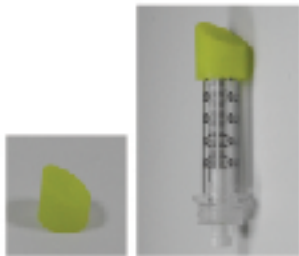

실리콘 캡 사선형
경사도가 심한 부위에 사용 시(예: 안쪽 치마 등)

STEP 5

별매품

주사기 본체의 조금 더 편리한 가압을 위하여 필요에 따라 선택적 구매를 하세요.



가압상자

파우치 세트 구매 고객의 경우, 휴대용 가압레버만이 들어 있습니다. 조금 더 손쉽고 빠른 가압을 원하시는 경우 본 가압상자를 구매 하세요. 2 in 1 세트 구매 고객의 경우에도 여분의 가압상자를 원할 경우 별도로 추가 구매가 가능합니다.